

Azzurro Lux kosmetikstol 4m



Försiktighet!

1. Fotstödet är inte konstruerat för att bära en vuxen persons fulla vikt.
2. Sitt inte direkt på armstödet eller fotstödet.
3. Lyft inte mer vikt än vad sitsen klarar av att bära.
4. Av säkerhetsskäl ska du alltid ansluta nätsladden till ett jordat uttag.
5. Bind inte fast nätsladden i enheten. Om du lyfter eller drar i nätsladden kan den skadas. Se till att nätsladden är lätt att dra ut i en nödsituation.
6. Innan du flyttar den elektriska skönhetsstolen ska du ta bort nätsladden så att den inte fastnar mellan stolens delar.
7. Om nätsladden är skadad ska du omedelbart dra ut sladden, inte använda stolen och kontakta ett auktoriserat servicecenter. Använd endast den ursprungliga nätsladden.
8. Tillåt inte en person som inte utför behandlingen att styra fjärrkontrollen.
9. Placera inga föremål under stolen.
10. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt sitsen så att den kan fällas och fällas ut fritt.
11. Se till att det inte finns några vassa eller skadliga föremål runt sitsen som kan skada enheten.
12. Modifiera inte enheten själv. Om stolen inte fungerar som den ska ska du sluta använda den och kontakta ett auktoriserat servicecenter.
13. Kasta inte tunga föremål på stolen och hoppa inte på den.
14. Personer med funktionsnedsättning bör inte använda stolen.

Montering

1. För in nackstödet i hålet på ryggstödet ovasida (fig. 1).
2. Placera och anslut vänster och höger armstöd till sätesbulten och vrid dem 90° moturs (fig. 2).


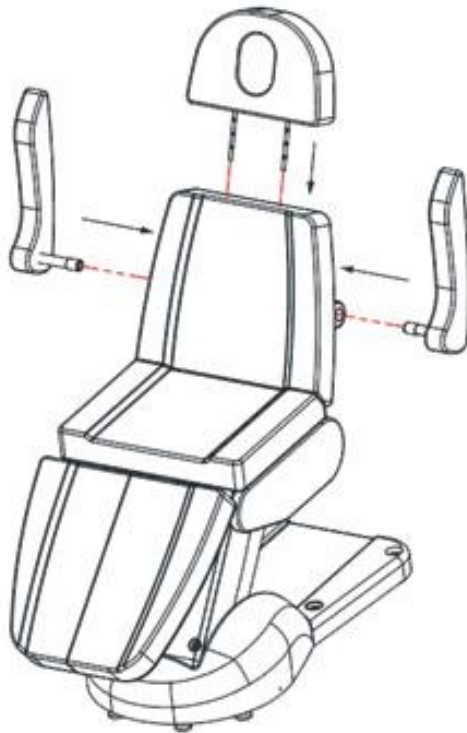


Fig.1



Fig. 2

Fjärrkontroll

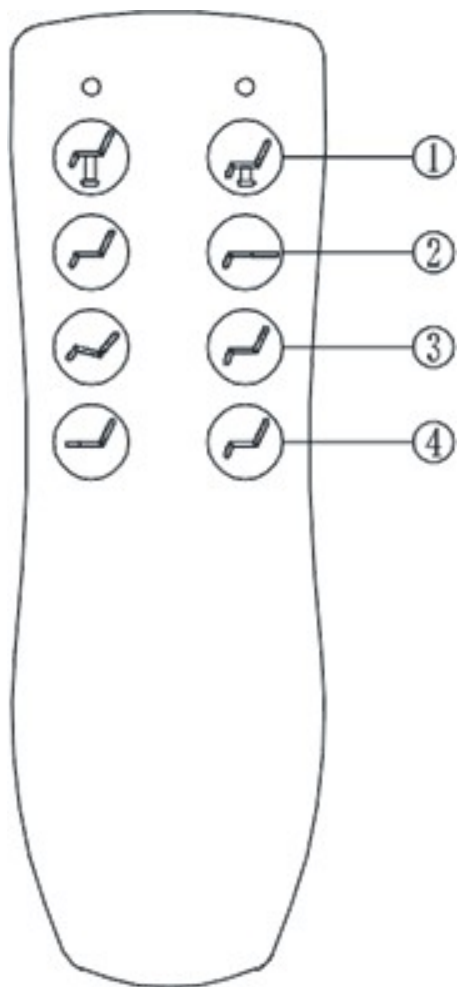

1. Tryck på  eller , för att justera sitsen uppåt och nedåt.
2. Tryck på  eller , för att justera ryggstödet vinkel.
3. Tryck på  eller  för att ändra sitsvinkeln.
4. Tryck på  eller  för att justera fotstödet vinkel.

- Nackstödet höjd kan justeras genom att dra upp det eller trycka ner det.



Underhållsåtgärder:

Rengöring och desinficering av enheten:

- Koppla ur enheten före rengöring.
- För att hålla stolens yta i gott skick bör den rengöras regelbundet. Kom ihåg att rengöra och desinficera stolen efter varje användning. Vi rekommenderar att du utför en grundlig desinfektion en gång i månaden.

I Metall- och plastytor

- För att rengöra metall- och plastytor och reglage, torka av dem med en fuktig trasa. med en fuktig trasa. En liten borste fungerar bra för att rengöra svåråtkomliga områden eller hörn. Använd inte för mycket vätska för att rengöra apparaten. Desinficera sedan apparaten med en lämplig vätska.

II Ytor av rostfritt stål

- Rengöring med ett mildt rengöringsmedel fungerar bäst. Ammoniak och de flesta lösningsmedel kan användas för att ta bort svåra fläckar. Undvik klorbaserade lösningar.

III Målade eller förkromade metallytor

- Använd inte vattenstrålar (duschar, högtrycksvattenkanoner) för rengöring.
- Rengör inte vid höga temperaturer och hög luftfuktighet och utsätt inte enheten för förhållanden som kan leda till att vätska tränger in.
- Använd inte lösningsmedel eller syror för rengöring.

IV Stolens yta

- Torka av sitsens yta jämnt med ett speciellt läderrengöringsmedel och torka sedan av den med en ren, mjuk trasa.

Apparaten måste kopplas bort från strömförsörjningen före underhåll.

- Reparationer ska utföras av erfaren och av tillverkaren auktoriserad personal.
- Reparationer som utförs av obehörig personal kan orsaka personskador eller skador på apparaten som tillverkaren inte ansvarar för.
- Använd endast originalreservdelar som godkänts av tillverkaren.
- Använd inte den elektriska skönhetsstolen eller tillbehören om de inte fungerar som de ska.
- Allt underhålls- och reparationsarbete måste dokumenteras.

Varning för fel!

- Om du upptäcker några fel ska du sluta använda utrustningen och kontakta en auktoriserad auktoriserat servicecenter. Endast erfaren eller auktoriserad personal får öppna eller byta ut manöverdonet.
/ kontrollenhet.

Om någon del av enheten är skadad ska du dra ut nätkabeln och sluta använda den. Meddela sedan serviceavdelningen.

Felsökning och felavhjälpning:

Problem	Erkännande	Lösning på problemet
Knapparna svarar inte	- Kontrollera att strömkontakten är ansluten - Kontrollera att alla kontakter som ansluter transformatorn är korrekt anslutna	- Koppla ur nätkontakten och anslut den igen - Koppla ur alla anslutningskontakter och anslut dem igen
Buller och vibrationer uppstår när du lyfter stolen	- Lösa skruvar	- Dra åt skruvarna
Indikeringslampan tänds inte	- Fjärrkontrollens kabel är inte ordentligt ansluten eller fjärrkontrollen är defekt	- Återanslut kabeln, om den fortfarande inte fungerar, byt ut fjärrkontrollen

- När du använder stolen bör fjärrkontrollen vara minst 20 cm från högfrekvent utrustning för att undvika störningar.

Tekniska data: Mått

Mått: 2000x810x610-910 mm

Maximal belastning: 140 kg

Nettovikt: 73 kg

Justeringsområde för höjd: 610-832 mm

Ingångsspänning: AC 100/130V / 220/240V, 50/60 Hz

Utgångsspänning: DC 24V

SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetsalonger. Genom att endast låta kvalificerad kosmetisk personal använda apparaten undviker man oönskade följder under behandlingen.
- Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIV Tomasz Pacholczyk).
- Installera eller använd inte enheten i närheten av vätskor, våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i enheten.
- Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta det auktoriserade serviceföretaget ACTIV Tomasz Pacholczyk i följande fall: a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller höljet har skadats.
- Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
- Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
- För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
- Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
- För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).

10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du faror.
2. Denna apparat får användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ reglerna för bortskaffande av sådana regler för avfallshantering. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste förbrukade elektriska produkter samlas in separat och lämnas till insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas in för återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen och till ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i sin originalförpackning vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.

