

## Steg för steg användning

### Digital vaxvärmare

Anslut strömkabeln och slå på enheten.

Ställ in temperaturen för att smälta vaxet med TEMP. För innerskål i aluminium kan maximal temperatur användas. För plast rekommenderas 65 °C. Tryck därefter på knapp 0 för att starta smältningen av paraffinvaxet. Kontrolllampan tänds och displayen visar aktuell vaxtemperatur.

När kontrolllampan slocknar har temperaturen stabiliserats. Upprepa processen tills vaxet är helt smält.

Sänk temperaturen till önskad arbetstemperatur, vanligtvis mellan 50 °C och 60 °C. Testa alltid vaxets temperatur genom att applicera lite vax på handleden innan användning.

Stäng av enheten och dra ur kontakten efter avslutad användning.

### Manuell vaxvärmare

Anslut strömkabeln och slå på enheten. Vrid temperaturreglaget till högsta nivå.

Kontrolllampan tänds och uppvärmningen startar.

När vaxet är helt smält, justera temperaturen till önskad nivå, vanligtvis 50 °C till 60 °C. Testa temperaturen på handleden innan behandling.

För att stänga av värmaren, vrid reglaget långsamt åt motsatt håll tills ett svagt klick hörs. Dra därefter ur kontakten.

### Observera

Det tar cirka 120 minuter att smälta vax i plastinnerskål och cirka 60 minuter i aluminiuminnerskål.

Tiden kan variera beroende på mängden vax som används.

### Behandlingssteg för händer och fötter

Packa upp paraffinvaxet och bryt det i mindre bitar innan du lägger det i vaxbehållaren.

Ta av alla smycken som ringar och armband.

Tvätta händer eller fötter noggrant och torka dem helt torra.

Massera huden lätt för att avlägsna eventuell irritation.

Applicera ett tunt lager skyddande hand eller fotkräm och massera in.

Sänk ner händerna eller fötterna i vaxet utan att böja fingrar eller tår.

När vaxet slutat droppa, doppa igen. Upprepa totalt fem gånger.

Sätt på plastpåsar och därefter bomullsvantar eller sockor för att bevara värmen.

Efter cirka 10 minuter, ta av vantarna eller sockorna och avlägsna plastpåsar samt vaxet från handled till fingertoppar eller från fotled till tår.

Applicera åter skyddande kräm och massera in för bästa resultat.

Samma metod används för både händer och fötter.

### Viktiga tips och säkerhetsråd

Kontrollera alltid vaxets temperatur på handleden före användning.

Använd inte på skadad, irriterad eller mycket förhårdnad hud.

Tillsätt inte nytt vax medan befintligt vax är varmt. Låt det svalna helt innan nytt vax tillsätts.

Vänta minst en minut innan du startar enheten igen efter avstängning.

Använd endast den spänning som anges på produkten.

Om värmaren slutar fungera, stäng av den och starta om efter kort paus.  
Produkten uppfyller standarden Q (GZ) YMMRBJ1 2005 och är CE certifierad.

#### Produktinformation

Paraffinbehandling gör huden mjuk, len och återfuktad, särskilt effektiv för torr hud.  
Effekten är extra uppskattad under kalla och torra vintermånader.

Behandlingen är enkel att utföra och uppskattad av både professionella terapeuter och privatpersoner världen över.

Till skillnad från många andra hudbehandlingar ger paraffin en omedelbar känsla av mjuk och sammetslen hud redan efter första användningen.