

BRUKSANVISNING

Paraffinberedare 300W



Tekniska data

Nominell spänning	220V/240V
Elektrisk effekt	300W
Nominell frekvens	50/60HZ
Temperaturområde	70° maximalt
Mått och dimensioner	31 x 24 x 16 cm
Kammarens kapacitet	1,8 LITER - 2,5 LITER

Bruksanvisning:

1. Anslut apparaten till strömförsörjningen.
2. Lägg i paraffinet i apparaten (i skålen/hållrummet i mitten av apparaten).
3. Ställ in temperaturen på HI (70°C) genom att vrida på ratten och vänta tills paraffinet har lösts upp.
4. Sänk sedan temperaturen till LO (55°C). Placera grillplattan på apparatens undersida (detta för att undvika eventuell brännskada).
5. Innan paraffinbehandlingen på händerna kan du göra en skrubba för bättre effekt och sedan applicera ett lager kräm.
6. Du kan sedan doppa dina händer eller fötter direkt i paraffinvaxet genom att placera dem i paraffinvaxmaskinen.
7. Sätt händerna i foliehandskar och sedan i frottéhandskar och håll dem så här i cirka 20 minuter.
8. Om behandlingen görs på fötterna, linda in dem i folie först och sätt sedan på strumpor och håll dem också så här i 20 minuter.
9. Efter denna tid tar du bort handskarna/sockorna och engångspåsarna tillsammans med paraffinet.
10. När du är klar, applicera fuktkräm, vrid sedan ratten till OFF och dra ut kontakten.

Tips:

1. Kontrollera paraffinets temperatur på din handled före användning.
2. Använd inte på skadad hud.
3. Använd inte på hud med akne.
4. Häll inte ut det smälta paraffinet. Låt det svalna först, slå sedan på apparaten i ca 1 minut och ta bort det nedersta lagret av paraffin när det har smält.
5. Vänta minst en minut innan du slår på apparaten igen.
6. Du måste använda den spänning som anges på apparaten.

Var uppmärksam!

- Upphettat paraffin är varmt. Hantera det försiktigt för att undvika brännskador.
- Använd paraffin utan förpackning.

Rengöring av apparaten:

1. Använd inte lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.
2. Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen före rengöring.
3. Blötlägg inte apparaten i vatten.
4. Använd inte vassa föremål för rengöring.
5. Du kan använda en speciell vätska för att ta bort vax- och paraffinrester.

Var uppmärksam på

- Apparaten bör rengöras regelbundet för att förhindra ansamling av smuts, damm och andra oönskade ämnen. Ansamling av ovanstående kan leda till funktionsfel på apparaten eller till och med skada på utrustningen.
- Det är inte tillåtet att linda nätsladden runt apparaten, eftersom det kan leda till att sladden inte fungerar som den ska.
- Se alltid till att apparaten får ström från en källa med rätt spänning. Se till att stickkontakten är ordentligt isatt i uttaget. I annat fall kan det leda till brand, elektriska stötar eller brännskador.
- Kabeln får inte ändras, sträckas, böjas eller vridas för mycket.
- Inget tungt får placeras på sladden.
- Förhindra att damm eller andra skadliga ämnen tränger in i kontakten.
- Slå eller kasta inte apparaten. Om apparaten skadas till följd av en stöt eller ett fall kan du inte fortsätta att använda den.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Ltd.).
2. Installera eller använd inte enheten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i enheten.
3. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ett auktoriserat servicecenter som tillhandahålls av ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller höljet har skadats.
4. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte apparaten i områden där någon kan trampa på nätsladden.
5. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med apparaten.
6. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen, dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
7. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
8. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
9. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. I annat fall annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med brinner upp.

FÖRSIKTIGHET

1. Vid skador på nätkabeln eller andra funktionsfel, kontakta en för att undvika fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och förtrogenhet med utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur man använder utrustningen på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.

4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan innebära hälsorisker eller leda till dödsfall, så förvara den utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv

2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska förbrukade elektriska apparater samlas in separat och lämnas till insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Gamla apparater som innehåller komponenter som är helt återvinningsbara bör därför skickas till återvinning när de är uttjänta. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras i en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C endast i sin originalförpackning. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.

