

Instruktioner för användning

SILLON Eclipse 4 sil elektrisk kosmetikstol.



Skanna
för olika
språk




Mått och egenskaper



Funktioner och egenskaper:

- ENKEL JUSTERING: Ryggstödet och sitsen på kosmetikstolen justeras enkelt med hjälp av Effortless-sidoknappen, så att du bekvämt kan justera klientens position under behandlingen.
- Omfattande design: Stolen består av en styrenhet, motorer, metallkomponenter och läder. Styrenheten är utformad för att kunna kombineras med en handhållen kontrollpanel och fyra motorer.
- Integrerad funktionalitet: Innehåller fyra sektioner: ryggvinkeljustering, vinkeljustering sits, vinkeljustering av fotstöd och justering av sitshöjd - allt integrerat i en och samma struktur.
- Användarvänlig drift: Stolen har en elegant och användarvänlig design som ger enkel drift och komfort.
- Hög stabilitet: Stolen erbjuder stor stabilitet och en hög säkerhetsnivå, utan någon märkbar vobbling i någon vinkel eller höjd.

Fjärrkontroll:

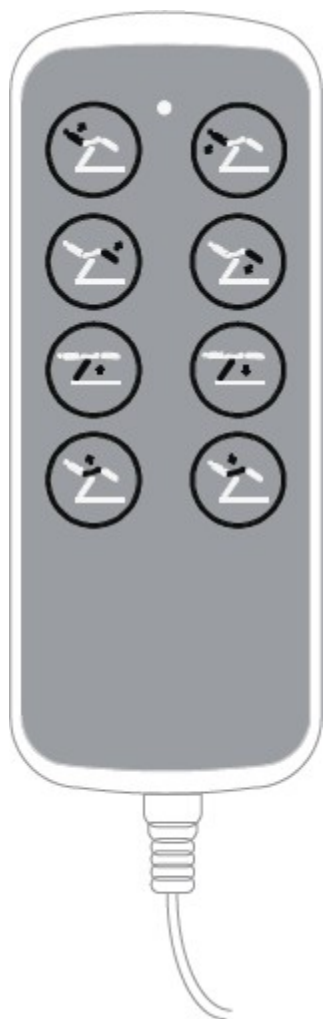

Tryck på  eller , för att styra lyftvinkeln för av spa-stolens ryggstöd.

Tryck på  eller  knappen för att styra lyftvinkeln på spaföljens fotstöd.

Tryck på  eller  för att styra höjningen eller sänkningen av hela spafåtöljen.

Tryck på knappen  eller  för att reglera vinkeln på på spa-stolens säte.

Varning för fotstödet:

1. Fotstödet är inte konstruerat för att bära en vuxen persons fulla vikt.
2. Sitt inte direkt på armstödet eller fotstödet.
3. Se till att avståndet mellan uttagen inte överstiger 2 meter.

Försiktighet!

- Av säkerhetsskäl ska du alltid ansluta nätkabeln till ett jordat uttag.
- Knyt inte fast nätsladden i apparaten. Om du lyfter eller drar i nätsladden kan den skadas. Se till att nätsladden lätt kan tas bort i en nödsituation.
- Innan du flyttar den elektriska kosmetikstolen ska du ta bort nätsladden så att den inte fastnar mellan några av stolens delar.
- Om nätsladden är skadad ska du omedelbart dra ut sladden, inte använda stolen och kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast den ursprungliga n ä t s l a d d e n .
- Tillåt inte en person som inte utför behandlingen att styra fjärrkontrollen.
- Placera inga föremål under stolen.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt stolen.
- Se till att det inte finns några vassa eller skadliga föremål runt stolen som kan skada enheten.
- Gör inga egna ändringar på apparaten. Om stolen inte fungerar som den ska ska du sluta använda den och kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Rengöring och desinficering av enheten:

Koppla bort enheten från strömförsörjningen före rengöring.

För att hålla stolens yta i gott skick bör du rengöra den regelbundet. Kom ihåg att rengöra och desinficera stolen efter varje användning. Vi rekommenderar att du utför en grundlig desinfektion en gång i månaden.

I Metall- och plastytor

För att rengöra metall- och plastytor och reglage, torka av dem med en fuktig trasa. En liten borste fungerar bra för att rengöra svåråtkomliga områden eller hörn. Använd inte för mycket vätska för att rengöra apparaten. Desinficera sedan apparaten med en lämplig vätska.

II Ytor i rostfritt stål

Rengöring med ett mildt rengöringsmedel fungerar bäst. Ammoniak och de flesta lösningsmedel kan användas för att ta bort svåra fläckar. Undvik klorbaserade lösningar.

III Målade eller förkromade metallytor

Använd inte vattenstrålar (duschar, högtrycksvattenkanoner) för rengöring.

Rengör inte i höga temperaturer och hög luftfuktighet, utsett inte enheten för förhållanden som kan leda till vätskekontaminering.

Använd inte lösningsmedel eller syror för rengöring.

IV Stolens yta

- Torka av sitsens yta jämnt med ett speciellt läderrengöringsmedel och torka sedan av den med en ren, mjuk trasa.

Underhåll

Koppla från enheten före underhåll.

1. Reparationer ska utföras av erfaren och av tillverkaren auktoriserad personal. Reparationer som utförs av obehörig personal kan leda till personskador eller skador på apparaten som tillverkaren inte ansvarar för.
2. Använd endast originalreservdelar som är godkända av tillverkaren.
3. Använd inte den elektriska skönhetsstolen eller tillbehören om de inte fungerar som de ska.
4. Allt underhålls- och reparationsarbete måste dokumenteras.

Underhållsåtgärder

Kontrollera manöverorganen och deras kablage en gång i veckan. Kontrollera skicket och funktionen hos följande delar minst en gång i halvåret:

1. Strömförsörjningskabel och dess infästning
2. Motorns kablage
3. Manöverboxen och dess kablage
4. Om tillbehören är monterade
5. Normal funktion av låssystemet

Om du upptäcker några fel ska du sluta använda stolen och kontakta ett auktoriserat servicecenter. Endast erfaren eller auktoriserad personal får öppna eller byta ut manöverdonet/styrenheten.

Om någon del av enheten är skadad ska du dra ut nätkabeln och sluta använda den. Meddela sedan serviceavdelningen.

Tekniska data:

- Sittmått: 1930× 820× 670W~870 (mm)
- Justeringsvinkel för ryggstöd: ca 85° max
- Sitsens inställningsvinkel: ca 12° max
- Fotstöds justeringsvinkel: ca 90° max
- Nettovikt: 96 kg
- Bruttovikt: 110 kg
- Maximal belastning: 200 kg (vid normal användning)
- Strömförsörjning: AC 100-120 V, 50 Hz/60 Hz eller AC 220-240 V, 50 Hz/60 Hz
- Maximal effekt: 300 W

Problem	Orsak	Lösning
Sitsen reagerar inte när man trycker på någon knapp	a) Funktionen för den knapp som trycks in har ändrats till ett extremt värde b) Kontrollera att strömkontakten är korrekt ansluten c) Kvalitetsproblem av kontrollpanelen Handbok	a) Försök trycka på andra knappar b) Koppla ur och återanslut strömkontakten c) Byt ut den manuella kontrollpanelen
Konstigt ljud och vibrationer när du höjer och sänker sätet.	a) Bultarna är lösa b) Roterande delar är inte tillräckligt smorda c) Problem med kvaliteten Motor	a) Dra åt alla bultar b) Tillsätt lite fett c) Byt ut motorn

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning vid kosmetiska operationer. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Installera eller använd inte enheten i närheten av vätskor, våta platser eller med våta händer - så, så att inga vätskor kan tränga in i enheten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta det auktoriserade serviceföretaget ACTIV Tomasz Pacholczyk i följande fall: a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller höljet har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller ner. Skador kan uppstå.
9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att du håller ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätkabeln eller andra funktionssstörningar ska du kontakta en auktoriserad servicecenter för att undvika fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och förtrogenhet med utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur man använder utrustningen på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste begagnad elektrisk utrustning samlas in separat och sedan

lämnas till insamlingsställen för begagnad elektrisk och elektronisk utrustning.

Uttjanta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför skickas till upparbetning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen och till ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C i originalförpackningen.

originalförpackningen. Förvara apparaten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.

